

# LINGETTES IMPRÉGNÉES D'UNE SOLUTION DÉSINFECTANTE HYDRO-ALCOOLIQUE POUR LES SURFACES



## PHAGO'WIPES DASR



- Prêt à l'emploi
- Large spectre désinfectant
- Sans rinçage

### UTILISATION

Les PHAGO'WIPES DASR peuvent être utilisées pour la désinfection rapide du petit mobilier, des chariots, des surfaces extérieures des dispositifs médicaux non invasifs et des petites surfaces proches du malade. Les lingettes peuvent être utilisées, sans rinçage sur les surfaces pouvant se trouver en contact direct avec les denrées alimentaires (table, plan de travail, plateaux, chariots de repas, trancheurs, hachoirs, couteaux...). Elles ne laissent pas de traces sur les surfaces.

### COMPOSITION

Actif désinfectant:

Ethanol (N° CAS : 64-17-5) : 52,70% m/m.

100% du total des ingrédients sont d'origine naturelle.

TP2 - Désinfectant pour les surfaces, matériaux, équipements et le mobilier sans contact direct avec les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux.

TP4 - Désinfectant pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires.

### CARACTÉRISTIQUES

Lingettes non tissées

Couleur des lingettes : bleues (réf. 460371D/460374D)

blanches (réf. 460372A)

Odeur : alcool

Point éclair : 23°C

### MODE D'EMPLOI

Les PHAGO'WIPES DASR sont prêtes à l'emploi.

Appliquer sur la surface à désinfecter. Ne pas rincer.

Laisser agir 15 minutes pour avoir un spectre de désinfection complet, ou selon l'activité souhaitée.

### COMPATIBILITÉ

Faire un essai au préalable sur plexiglass.

### ACTIVITÉ ANTIMICROBIENNE

BACTÉRICIDE

EN 1040, 5 min

EN 1276 dont *S. typhimurium* et *L. monocytogenes*, 30 s

EN 13727+A2, 5 min

EN 13697 dont *S. typhimurium* et *L. monocytogenes*, 2 min

EN 16615, 1 min

FONGICIDE

EN 1275, 15 min

EN 1650, 15 min

EN 13624, 15 min

EN 13697, 5 min

EN 16615, 5 min

MYCOBACTÉRICIDE

EN 14348, 5 min

VIRUCIDE

EN 14476+A2 (*Adenovirus* et *Norovirus*), 15 min.

Actif sur *Rotavirus*, *Coronavirus*, HBV, HCV, HIV, *Herpes virus*, *orthomyxovirus*, *Influenza A/H5N1* et *Influenza A/H1N1*, 15 min.

### CONSERVATION

Péremption : 3 ans à partir de la date de fabrication.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Produit réservé à un usage professionnel.

La fiche de données de sécurité est disponible sur le site [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.

### RÉFÉRENCES

460371D	Boîte de 200 lingettes bleues (Dim. : 20cm x 20cm) Palette de 42 cartons de 10 boîtes (ø10 cm, H. 23,4 cm)
460372A	Boîte de 200 lingettes blanches (Dim. : 20cm x 17cm) Palette de 64 cartons de 10 boîtes (ø11 cm, H. 18,5 cm)
460374D	Seau de 500 lingettes bleues (Dim. : 20cm x 20cm) Palette de 36 cartons de 2 seaux (ø26,8 cm, H. 26,3 cm)

